



# Smartklockans funktioner



SENSOREM

# Innehållsförteckning

1. Tillhörande delar	s.3
2. Knappar och inställningar	s.3
3. Starta smartklockan	s.4
4. Att ladda smartklockan	s.4
5. Hur larmar man?	s.6
6. Att ta emot samtal till klockan	s.7
7. Att dölja sin position	s.7
8. Att byta armband på klockan	s.8
9. Specifikationer och återvinning	s.9
10. Kontaktinformation	s.9

# 1. Tillhörande delar



Bild 1

1. Smartklockan Bo



Bild 2

2. Laddningsladd



Bild 3

3. Transformator

# 2. Knappar och inställningar



Bild 4

Bild 5

## Trygghet i vardagen!



Vetskapen om att någon alltid mottar larmet och vet om användarens GPS-position, och därmed kan agera (larmmottagare eller Sensorem AB) ska inge trygghet, både för användaren och larmmottagare. Om du vill ändra antalet larmmottagare och/eller dess ordningsföljd, vänligen kontakta Sensorems support. Du vet väl att du kan bjuda in vänner till Sensorem och bli belönad? Läs mer om detta på Sensorems hemsida.

### 3. Starta smartklockan

- Klockan är förprogrammerad och klar att börja användas direkt vid leverans. Starta klockan genom att hålla in larmknappen som sitter på höger sida av klockan (se Bild 4) tills Sensorems logga visas på skärmen (ca 5 sekunder).
- Väl påslagen är klockans skärm svart i standbyläge/inaktivt läge. Skärmen tänds genom ett kort tryck på larmknappen och visar då tiden (det finns inte någon risk att råka larma då knappen behöver hållas in i tre sekunder för att ett larm ska ske). För att se täckning och batterisymbolen, svep sedan med fingret från toppen till botten av skärmen (se Bild 5). För att återgå till huvudmeny (Bild 4), tryck en gång på knappen. Skärmen släcks alltid automatiskt efter 15 sekunder.

### 4. Att ladda smartklockan

- Smartklockan laddas genom att placera den tillhörande laddarens metallkontakter på klockans baksida (Bild 2). Metallkontakterna dras automatiskt mot klockan. Om du placerar laddaren åt fel håll kommer laddkontakten på klockan att stöta bort laddaren. När klockan laddar står det "Laddar" med röd text på skärmen, och en laddningssymbol visas i klockans högra hörn.
- Klockans batteritid är cirka 4-5 dagar, beroende på användning. Att ladda klockan tar ca 1,5-2 timmar och givetvis går det att larma medan klockan laddas. När klockan är fulladdad står det "Färdigt" i röd text på klockans skärm. Dessutom spelas det upp en röst som säger "Klockan är fulladdad". Detta meddelande spelas endast upp mellan 10:00 - 21:00 på dygnet för att säkerställa att användaren inte blir störd under nattimmarna. Rösten spelas upp ett antal gånger, men man kan enkelt trycka bort rösten och meddelandet genom att trycka en gång på knappen.
- När 25% av batteriet återstår lyser klockan upp med texten "**Påminnelse, låg batterinivå**", samtidigt spelas ett röstmeddelande upp som säger "**låg batterinivå, vänligen ladda din klocka.**" Meddelandet är kvar på skärmen tills användaren bekräftar att meddelandet är uppfattat genom att trycka en gång på larmknappen, alternativt slutar meddelandet automatiskt att spelas upp cirka 30 sekunder senare. Om den låga batterinivån inträffar mellan 21:00 -10:00 på dygnet väntar klockan med att spela upp meddelandet tills tidsintervallet har passerat. Om klockan därefter inte laddas återfår skärmen texten "Lågt batteri" fram tills dess att klockan laddar ur helt eller laddas upp.

## Om klockan laddar ur

- Om klockan laddar ur helt och stängs av måste den sättas på igen. För att göra detta håller man in larmknappen i cirka 5 sekunder tills att Sensorems logga lyser upp. När man gör detta finns ingen risk att man råkar larma så var inte rädd för att hålla inne larmknappen för att starta klockan igen.
- För att se om klockan är avstängd/urladdad kan man trycka en gång på larmknappen och se om skärmen lyser upp och visar tiden. Om klockan då endast visar laddningssymbolen och inte tiden är klockan avstängd/urladdad och då sätter man på den igen genom att hålla inne larmknappen, se beskrivning ovan. **Klockan startar alltså inte automatiskt om den har laddat ur.**



Håll in larmknappen tills Sensorems logga lyser upp för att starta klockan efter urladdning.



- Klockan får endast laddas med den medföljande laddkabeln och väggadaptern avsedd för klockan. Det går inte att stoppa kabeln i exempelvis en telefonladdare. Detta leder till att klockan får en kraftigt försämrad batteritid, alternativt inte går att ladda alls.
- **Kontakta oss om ni behöver en extra laddare eller kabel så skickar vi ut detta till er – likaså om armbandet på klockan slits ut.**

## 5. Hur larmar man?

- Det går att aktivera larmet oavsett om klockan laddar, är i standbyläge/inaktivt läge, eller i huvudmenyn. För att aktivera larmet, tryck och håll in larmknappen i tre sekunder och släpp sedan knappen. Användaren får en tydlig återkoppling på att larmet har gått iväg genom att texten "SOS" dyker upp på klockans display, tillsammans med texten "Larm aktiverat", följt av texten "Larmar". Följande flöde sker därefter:



Bild 6

1. Samtliga fördefinierade larmmottagare får notiser i sina mobiltelefoner om larmet, och användarens GPS-position och status uppdateras i Sensorem-appen. **OBS!** Användarens GPS-position visas alltid i appen i samband med ett larm men uppdateras även med viss regelbundenhet när larmet inte används. Vid uppdatering av aktuell position kan den första positionen ringa in ett större område. Det är därför viktigt att vänta 1 minut tills dess att cirkeln har minskat i storlek, för en mer korrekt position.
2. Samtidigt ringer klockan upp de fördefinierade larmmottagare i önskad ordningsföljd, exempelvis "Pelle", "Kalle" och "Lisa". Om "Pelle" inte kan ta emot samtalet ringer klockan automatiskt upp "Kalle" följt av "Lisa". Om ingen av dem svarar ringer klockan upp samtliga larmmottagare en andra gång. Om ingen är anträffbar den andra gången kopplas samtalet vidare till Sensorems larmcentral som då agerar på larmet (öppet dygnet runt, alla dagar).

## 6. Att ta emot samtal till klockan

- I välkomstbrevet står det vilket telefonnummer klockan har tilldelats. Telefonnumret är ett vanligt mobiltelefonnummer som du kan ta emot samtal ifrån när som helst.
- När någon ringer till klockan spelas en melodislinga upp i enheten så att användaren av klockan tydligt hör att någon ringer. Användaren svarar på samtalet genom att trycka på den gröna knappen som tydligt dyker upp på skärmen. Man kan även ställa in så att klockan svarar automatiskt på samtal, se *"Användarmanual till larmmottagare"*.



### Rekommendation

Ha alltid klockan påslagen. Klockans funktioner fungerar inte när klockan är avstängd. Klockan är dessutom vattentät och kan bäras överallt (dock inte simturer).

## 7. Att dölja sin position

- Du kan som användare av klockan välja om larmmottagare alltid ska kunna se din position, eller endast i samband med larm. Standardinställningen är att dina utvalda larmmottagare har möjlighet att se din position. Om du har Sensorems app så justeras detta under "Inställningar" – "Kontoinställningar". Om du inte har Sensorems app och vill att din position endast ska visas i samband med larm kontaktar du Sensorems kundtjänst via E-post eller telefon så ordnar vi detta.

## 8. Att byta armband på klockan

- Det finns två armbandstyper till klockan, ett gummiarmband med knäppning, och ett kardborrearmband. Dessa har två olika typer av fästen och byts ut enligt nedan:



Kardborrearmbandet har ett fäste som är markerat på bilden med en röd cirkel. För att ta av armbandet dras fästet nedåt vilket gör att det släpper ifrån klockan. För att sätta på armbandet dras fästet nedåt för att föras in och kan sedan släppas.



Gummibandet/orginalbandet med knäppning kräver en nål, eller liknande, för att trycka ned fästet. Ett "klick" resulterar i att fästet släpper ifrån klockan.



Halsbandet fäster runt "piggen" som medföljer på klockan. Längden på halsbandet är reglerbart, och halsbandet är även "strypanpassat".



## 9. Specifikationer och återvinning

<b>Storlek</b>	48,0mm x 31,5mm x 15,0mm
<b>Batterikapacitet</b>	850 mAh
<b>Vikt</b>	44g
<b>Batteritid</b>	Cirka 4-5 dygn
<b>Temperaturnivåer</b>	-35 till +40 grader
<b>IP klass</b>	IP67
<b>Kommunikation</b>	4G/3G/2G
<b>Position</b>	GPS, AGPD, LBS, WIFI



Produkten måste kasseras separat från övriga hushållssopor. Vänligen kassera produkten efter slutet av livslängden i kärl avsedd för elektronisk utrustning.

## 10. Kontaktinformation

Sensorem AB  
Engelbrektsgatan 9-11  
114 32 Stockholm



Email: [support@sensorem.se](mailto:support@sensorem.se)  
Tel växel: [+46 8 46 00 77 00](tel:+46846007700)

[www.sensorem.com/sv](http://www.sensorem.com/sv)